

Fixierlösungen
Hochwertig · Wirtschaftlich · Effizient

Mission Impossible?
Unsere Fixierlösungen sind
IVDR-konform!



DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität



Ossa Fixona®

Fixations- und Entkalkungsmittel für die Histologie

Ossa Fixona® ist eine simultan, schnell und schonend wirkende Fixier- und Entkalkungs-Lösung für histologische Knochenuntersuchungen. Die Dauer der Entkalkung steht in Abhängigkeit zur Schichtdicke des Probenmaterials. Eine anschließende Neutralisation ist nicht erforderlich, das entkalkte Gewebe kann wie üblich weiterbehandelt werden. Zusammensetzung: Trichloressigsäure, Zinkchlorid, Formaldehyd.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
1L	OSSA	63,57	57,30



SP8

Fixierlösung für Spermien zur Bewertung der Spermienmorphologie und -morphometrie

Eine Verdünnung mit einem Fixiermittel ist notwendig, um Spermien für eine bessere Zählbarkeit zu fixieren. Die Verdünnung ist erforderlich, um eine wässrige Probe für eine zuverlässigere Beladung des Hämocytometers zu erhalten. Mindestens 50 µl Sperma sollten mit der Verdünnungslösung gemischt werden, um eine repräsentative Probe mit ausreichendem Suspensionsvolumen zu erhalten (Vortexen ist nach der Fixierung möglich).

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
100 mL	SP8.0100	35,30	21,90
500 mL	SP8.0500	42,36	26,20

Nennen Sie uns Ihren Jahresbedarf!
Gerne erstellen wir Ihr individuelles Angebot.



F25

Formalin für die humanmedizinische Zelldiagnostik und zur Fixierung von humanen Proben

Die Fixierung des Gewebes mit 4%iger Formaldehydlösung führt zur Quervernetzung von Proteinstrukturen und damit zur Stabilisierung des Gewebes und Verhinderung der Autolyse. Für die Erhaltung von Struktur und Makromolekülen ist eine rasche Fixierung des Probenmaterials nach der Entnahme erforderlich. Daher ist darauf zu achten, dass sowohl die Zeit bis zum Einbringen des Gewebes in die Fixierlösung als auch die Diffusionszeit möglichst kurzgehalten wird. Die Gewebeprobe sollte optimal eine maximale Dicke von 0,5 cm haben. Die vorliegende Formaldehydlösung 4 %, gepuffert, pH 7,0 kann direkt als Arbeitslösung verwendet werden.

Pack.-Gr.	Gebinde	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
100 x 20 mL	PE-Dose	F25.0020	142,38	99,00
1 L	Kunststoffflasche	F25.1000	15,54	11,80
2,5 L	Eimer	F25.2500EI	42,53	29,90
5 L	Kanister	F25.5000	54,39	41,80
5 L	Eimer	F25.5000EI	62,60	49,90
10 L	Kanister	F25.9010	73,81	61,50



L25

Fixierlösung für humanes Probenmaterial aus kolorektalen Karzinomen

Zur Fixierung kolorektaler Karzinomresektionen für die anschließende histologische Diagnostik in der Krebsmedizin

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
5 L	L25.5000	100,77	63,00



Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig ab 8.04.2024.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.